

Сухожар №СН-360Т. Инструкция по эксплуатации

Технические характеристики:

Напряжение: 220В/50Гц

Потребляемая мощность: 300Вт

Известно, что бактерии и вирусы погибают при высокой температуре. Максимальная температура, на которую можно установить стерилизатор модели СН-360Т, составляет 200С°. Прибор широко применяется в лабораториях, местах общественного питания и салонах красоты.

Порядок работы со стерилизатором:

1. Подключите стерилизатор к источнику питания, который находится в комплекте.
2. Поместите необходимый инструмент на поднос и закройте крышку.
3. Установите время в соответствии с рекомендациями и включите стерилизатор. Красный индикатор означает, что прибор находится в рабочем состоянии. Далее устанавливаете необходимую вам температуру. После настройки температуры индикатор загорается зеленым светом. К моменту завершения стерилизации оба индикатора погаснут. Помните, что ни один из индикаторов не загорится, если вы сначала настроите только температуру. **Стандартный режим, при котором инструменты могут быть полностью стерилизованы и дезинфицированы: 125С°/15мин.**
4. По окончании работы переведите температурный переключатель в исходное положение.
5. После каждого использования необходимо отключать прибор от сети.

Указания по технике безопасности:

- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- После окончания работы прикрепите кольцо к подносу и вытащите поднос из стерилизатора.
- Ни в коем случае не трогайте горячий поднос руками.